

CARDIO  QVARK.

# Кардиомонитор CardioQVARK

Кардиограмма с помощью телефона



[www.cardioqvark.ru](http://www.cardioqvark.ru)

+7 985 717 05 25

Email: [info@cardioqvark.ru](mailto:info@cardioqvark.ru)

# Для пользователя

1

## Наденьте чехол CardioQVARK на iPhone

С помощью специального чехла для iPhone можно самостоятельно записать кардиограмму в любое время и в любом месте.



2

## Скачайте приложение CardioQVARK в App Store



3

## Зарегистрируйтесь

Заполните анкету и создайте профиль. Можно зарегистрировать нескольких пользователей. У каждого члена семьи будет свой профиль и пароль.

4


## Приложите пальцы к датчикам и снимите кардиограмму



5

## Просматривайте сохраненные кардиограммы





Каждую кардиограмму можно прокомментировать и отправить своему врачу для анализа. При регулярном мониторинге вы и ваш врач можете отслеживать динамику состояния сердца.

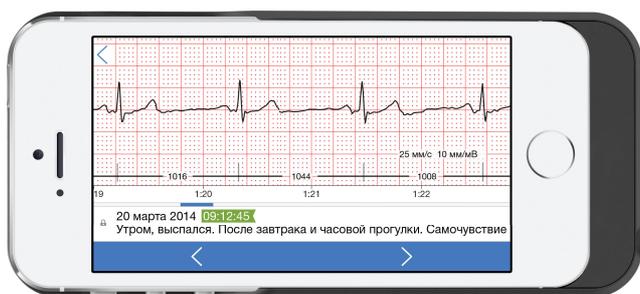

6

## Отправляйте кардиограммы вашему врачу для консультаций

# Экраны приложения для пользователя

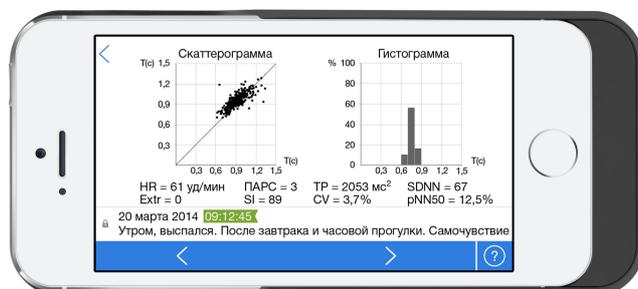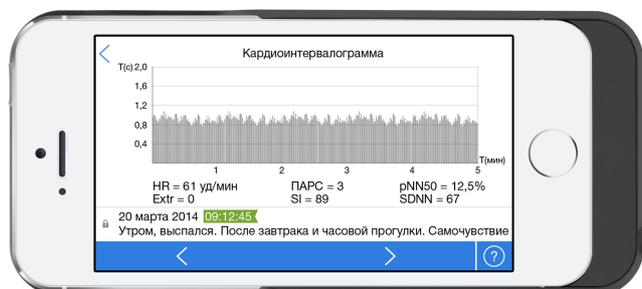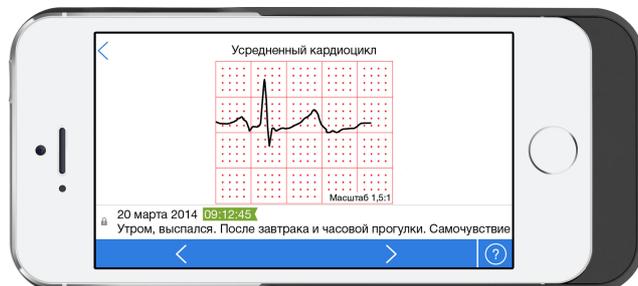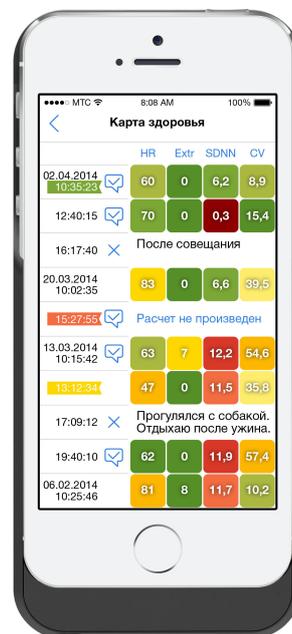

# Для врача

1

Установите приложение для iPad или программу Windows

2

Зарегистрируйтесь

Создайте учетную запись и добавьте пациентов. Вы получите кардиограммы, параметры variability сердечного ритма, основные графики и инструмент анализа усредненного кардиоцикла для каждого пациента.

3

Консультируйте пациентов

Вы получаете кардиограммы в реальном времени. Следите за динамикой состояния сердца своих пациентов. Консультируйте пациентов по почте или телефону.



# Экраны приложения для врача

